

2026年3月

お客様各位

株式会社村田製作所  
医療・ヘルスケア機器統括部

## Moni-Patch 深部体温センサシステムの添付文書の改訂（第2版）

### に関するお知らせ

拝啓 平素は Moni-Patch 深部体温センサシステムにつきましてひとかたならぬご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび Moni-Patch 深部体温センサシステムの添付文書を下記のとおり改訂いたしました。改訂版の電子化された添付文書は、これまでと同様に梱包箱及び取扱説明書末尾に示している GS1 コードを専用アプリケーション（添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」）で読み取ることにより閲覧いただけます。

引き続き倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

Moni-Patch 深部体温センサ及び Moni-Patch 貼り付けシートの有効期間延長、Moni-Patch 表示ユニット及び Moni-Patch 延長ケーブルの消毒方法の変更、その他体裁修正を行いました。変更点は表 1 のとおりです。

表 1. 添付文書の変更点

	変更前（旧版）	変更後（改訂版）
版	2024年3月（第1版）	2025年11月（第2版）
【使用方法等】 <使用方法等に関連する使用上の注意>	(5)及び(17)	(5) 及び(17) 体裁のみ変更
【保管方法及び有効期間等】 2. 有効期間	(1) Moni-Patch 深部体温センサ： <u>2年</u> (2) Moni-Patch 貼り付けシート： <u>2年</u>	(1) Moni-Patch 深部体温センサ： <u>使用期限は個装箱を参照【自己認証（当社データ）による】</u> (2) Moni-Patch 貼り付けシート： <u>使用期限は個装箱を参照【自己認証（当社データ）による】</u>

<p>【保守・点検に係る事項】          &lt;使用者による保守点検事項&gt;          1. 清掃・消毒</p>	<p>(2) Moni-Patch 深部体温センサは、消毒液※で湿らせた布で拭き、清掃および消毒する。Moni-Patch 表示ユニットは、消毒液※で湿らせかたく絞った布で拭き、清掃および消毒する。          ※使用できる消毒液          76.9 ~ 81.4v/v% エタノール          70v/v% イソプロピルアルコール          0.1w/v% 次亜塩素酸ナトリウム</p>	<p>(2) Moni-Patch 深部体温センサは、消毒液※で湿らせた布で拭き、清掃および消毒する。Moni-Patch 表示ユニット<u>及び延長ケーブル</u>は、消毒液※で湿らせかたく絞った布で拭き、清掃および消毒する。          ※使用できる消毒液          76.9 ~ 81.4v/v% エタノール          70v/v% イソプロピルアルコール          0.1w/v% 次亜塩素酸ナトリウム  <u>ただし、Moni-Patch 表示ユニット及び延長ケーブルの金属部分には、次亜塩素酸ナトリウムを使用しない。</u></p>
---	---	---

以上